

# ALLES SPÜLT

## ANLEITUNG ZUM PCR-TEST IN DER SCHULE

[www.bmbwf.gv.at/allesspueilt](http://www.bmbwf.gv.at/allesspueilt)

### WICHTIG

30 MINUTEN VOR DEM TEST NICHT ZÄHNE PUTZEN, KAUGUMMI KAUFEN, TRINKEN, ESSEN ODER RAUCHEN.



SICHERE SCHULE  
[www.sichereschule.at](http://www.sichereschule.at)

Bundesministerium  
Bildung, Wissenschaft  
und Forschung

**COVID-19 NACHGEWIESEN**  
DIE SCHULE INFORMIERT DIE SCHÜLERIN/  
DEN SCHÜLER, DIE ELTERN/  
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DAS LABOR.

**COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN**  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!


TESTRÖHRCHEN  
MIT LÖSUNG




QR-CODES



SCHUTZBEUTEL

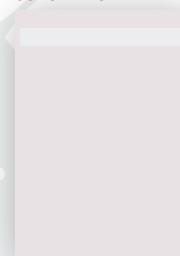

1



- Löse einen QR-Code vom Bogen
- Klebe ihn oben mittig auf den grünen Deckel des Röhrchens

**Wichtig!**


- Sticker FEST auf den sauberen/trockenen Verschluss (nicht auf das Röhrchen) aufdrücken
- Sticker feststreichen – auch am Rand!

2




- Öffne das Teströhrchen
- Leere die Flüssigkeit in den Mund
- Spüle die Flüssigkeit 30 Sekunden im gesamten Mundraum im Kreis

3



- Spucke die Flüssigkeit in das Teströhrchen

4



- Verschließe das Teströhrchen mit der Verschlusskappe

**Wichtig!**


- Schraubverschluss FEST zudrehen!

5



- Gib die Probe in den Schutzbeutel und verschließe ihn gut

6

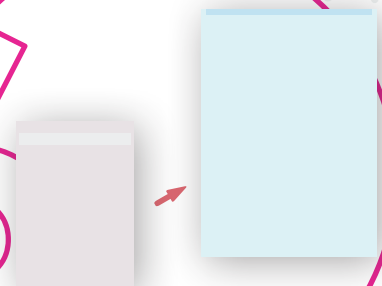

- Gib die Probe in den Sack.